

## Uživatelská příručka

Dentální kamera

---



### **Specifikace:**

Rozlišení: 1280 \* 720

Rozměr senzoru: 1/5 palce

Úhel pohledu: 70° (stupňů)

Nejlepší ohnisková vzdálenost: 1-1,5 cm

Expoziční automatické osvětlení

Provozní teplota: 0 až 70 stupňů

Napájení: přes USB 5V DC

Rozměry: 180x18mm

Podporuje: Android / IOS / XP / Win7 / win8 / win10

Formát fotografií: JPEG

Formát videa: AVI

## Instalace:

1. Instalovat aplikaci na Váš mobilní telefon lze 2-mi způsoby:
  - a) Naskenujte QR kód, který naleznete na konci tohoto návodu a nainstalujte aplikaci "**ToothBrush**" do Vašeho mobilního telefonu
  - b) vyhledejte "**ToothBrush**" na Google Play nebo App Store a nainstalujte aplikaci "**ToothBrush**" do Vašeho mobilního telefonu
2. Stiskněte krátce tlačítko ON/OFF, začne blikat z boku přístroje modrá dioda.
3. Na telefonu vyhledejte okolní WIFI sítě, přičemž požadovaná síť má název "XJ\_77xx", pokud bude vyžadováno, tak výchozí heslo je "12345678"
4. Po připojení k této síti otevřete nainstalovanou aplikaci.
5. Správná práce kamery je indikována modrou kontrolkou WiFi, která svítí nepřetržitě. Pokud modrá kontrolka nesvítí, zkuste kameru vypnout a bezdrátové spojení znovu navázat.
6. Nabíjení: Vždy nejprve vypněte kameru a poté připojte kabel do USB adaptéru nebo USB vstupu PC. Během nabíjení svítí Power indikátor (červený). Jakmile je akumulátor dobýtý, indikátor zhasne. Doba nabíjení je přibližně jedna hodina.



Pro Android



Pro IOS

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit. Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenes žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.