

Přenosná video lupa Uživatelská příručka



Vítejte


HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi nebo počítači. Je široce využívána ve školách pro slabozraké, ve veřejných knihovnách i dalších institucích.

Přehled

Obsah balení

1. Přenosná video lupa
2. Video kabel
3. USB kabel
4. Poutko
5. Nabíjecí adaptér
6. Čistící hadřík
7. Uživatelská příručka

Popis přístroje a funkce

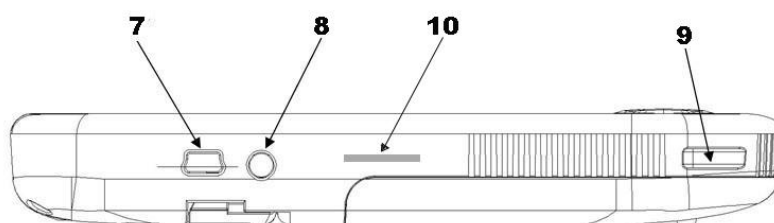


- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Zvětšení + | 6. Uložené soubory |
| 2. Zmenšení - | 7. Nabíjecí port |
| 3. Změna zobrazovacího režimu | 8. AV výstup |
| 4. Fotografie (Musí být vložena SD karta) | 9. ON/OFF zapnutí/vypnutí |
| 5. Zastavení | 10. Slot pro micro SD kartu |

Začínáme

Nabíjení lithium baterie 3 hodiny, používání 4 hodiny

Předtím, než začnete lupou používat, musíte nabít baterii.

1. Připojte konektor nabíjecího adaptéru do nabíjecího portu přístroje a připojte druhý konec adaptéru do běžné AC elektrické zásuvky. LED indikátor baterie začne narůstat, což značí, že se baterie nabíjí.
2. Když je baterie nabitá, LED indikátor se vypne.
3. Když je baterie slabá, na display začne blikat indikátor slabé baterie. Poté musíte připojit nabíjecí adaptér a baterii znovu nabít. Pro cestování si vezměte náhradní baterie.

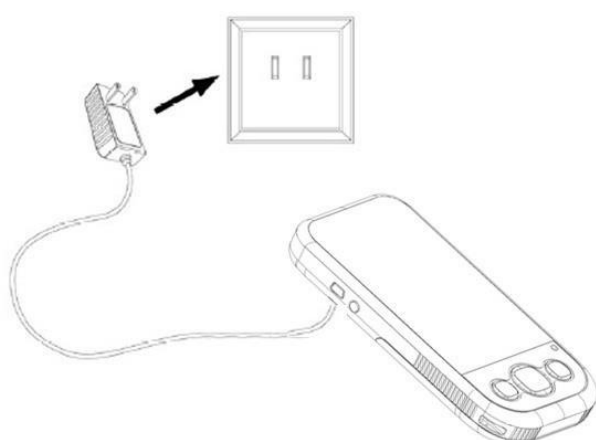

Používání lupy

Čtení s lupou

Pro čtení s lupou následujte tyto pokyny:

1. Zapněte přístroj do polohy ON(9).Přístroj se rozsvítí a na obrazovce se zobráí na 3 sec.text VELCOME
2. Umístěte lupu rovně na text, který chcete číst.
3. Umístěte lupu přibližně na místo,kde chcete začít číst. Cokoliv pod lupou je zvětšeno a zobrazeno na obrazovce.
4. Posouvejte lupu postupně doprava, abyste přečetli vše až do konce řádku. Posuňte lupu dolů a zpátky doleva, abyste mohli číst další řádek.
5. Pro změnu úrovně zvětšení stiskněte tlačítko zvětšení(1)
6. Pro změnu úrovně zmenšení stiskněte tlačítko zmenšení(2)
7. Pro změnu barvy na obrazovce, stiskněte tlačítko Video režim, dokud nenajdete pro Vás nejvhodnější barevný režim(3)
8. Pro zmrazení současného obrazu stiskněte tlačítko Zastavení/spuštění. Pro opuštění zmrazeného obrazu stiskněte znovu toto tlačítko(5)
9. Pro vytvoření fotografie textu stiskněte tlačítko fotografie(4)
10. Pro prohlížení vytvořených a uložených fotografií stiskněte tlačítko uložených souborů(6)

Úprava zvětšení

Stiskněte tlačítko pro listování 7-mi různými úrovněmi zvětšení od 2 do 32x.

Zmrazení obrazu

Stiskněte tlačítko Zastavení/spuštění pro přepínání mezi zmrazením obrazu a spuštěním.

Ukazatel slabé baterie

Pokud je baterie slabá, rozblíká se symbol v pravém dolním rohu obrazovky, který značí, že je potřeba nabít baterii.


Vypnutí

Posunutím zapínacího tlačítka ON/OFF vpravo přístroj vypnete a zhasne. Přístroj má také automatický režim pro šetření baterie.

Připojení k televizi

Pokud potřebujete větší zvětšení než je ,3,5 palcový obraz lupy, můžete přístroj připojit k televizi s použitím dodaného video kabelu. Pro připojení lupy k televizi následujte tyto pokyny:

1. Vložte 1/8 palcovou koncovou zástrčku dodávaného video kabelu tvaru Y do přístroje do portu AV výstup(8)
2. Vložte RCA zástrčku z video kabelu do vašeho televizoru do žlutého vstupního konektoru. Bližší informace o žlutém vstupním konektoru najdete v uživatelském manuálu Vaší televize.
3. Zapněte televizi. Pokud je to nezbytné, přepněte Vaší televizi na vhodný vstupní kanál. Zvětšovaný objekt se objeví na televizní obrazovce.

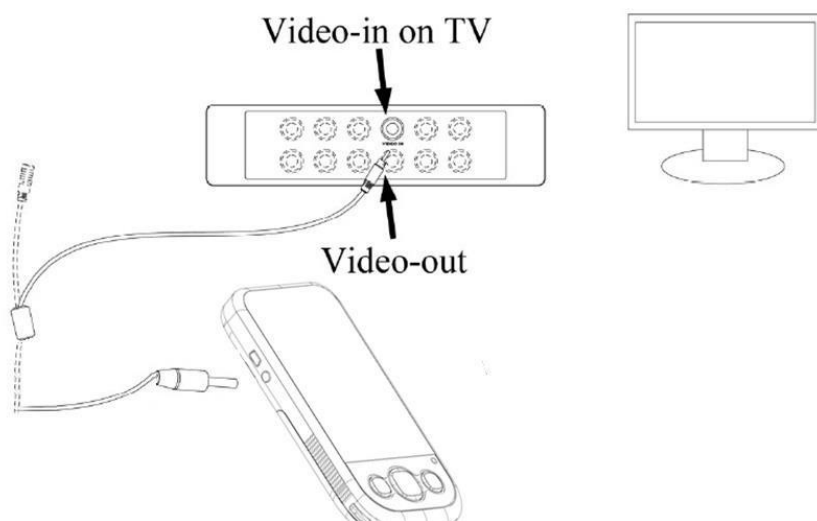

Řešení problémů, bezpečnost a údržba

Problém	Řešení
Obrazovka je prázdná.	Ujistěte se, že lupa je zaplá. Nabijte baterii. Ověřte, že objekt, který chcete zvětšit, je umístěn správně pod křížem.
Přístroj nejde zapnout. Obraz na obrazovce je tmavý a zkreslený.	Nabijte baterii. Ujistěte se, že lupa je umístěna na rovném stránce (povrchu), kterou čtete.
LED indikátor baterie není červený, i když nabíjecí adaptér je připojen do zásuvky. Baterie se nenabíjí.	Připojte do portu Power/Video. Ujistěte se, že zásuvka správně funguje. Pokud je adaptér připojen, ujistěte se, že přepínač je zapnutý.
Na obrazovce jsou skvrny nebo šmouhy. Text je příliš malý na čtení.	Vyčistěte obrazovku a okno s kamerou (umístěné na spodní straně přístroje). Stiskněte zvětšovací tlačítko.
Lupa je připojená k televizi, ale nezobrazuje se žádný zvětšovaný obraz.	Ujistěte se, že televize je zapnutá. Přepněte na televizi na správný program. Ujistěte se, že video kabel je bezpečně připojen k portu Power/Video na lupě a je zapojen do správného video vstupu na Vaší televizi.

Poznámka:

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých modelech drobně lišit. Přístroj používejte v souladu s platnými předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.