

Uživatelská příručka

Přenosná stolní lupa UM029



Vlastnosti a specifikace:

Displej: Použití jakéhokoliv standardního PAL nebo NTSC televizního přijímače s kombinovaným vstupem

Rozsah zvětšení: Na 17“ TV obrazovce:

8x,9x,10x,12x,,13x,16x,20x,27x - zvětšení závisí na velikosti obrazovky

Módy: Plně barevný. Zvýrazněná černá na bílé. Zvýrazněná bílá na černé.

Váha: 0,75 kg

Rozměry jednotky: 265x70 mm

Napájení: 100-240V s dodávaným adaptérem

LED osvětlení. Směr osvětlení lze měnit tak, aby vyhovoval uživateli.


Obsah Balení:

1x TV lupa

1x 100-230V adapter

1x Návod k obsluze EN + CZ ke stažení

Ovládání

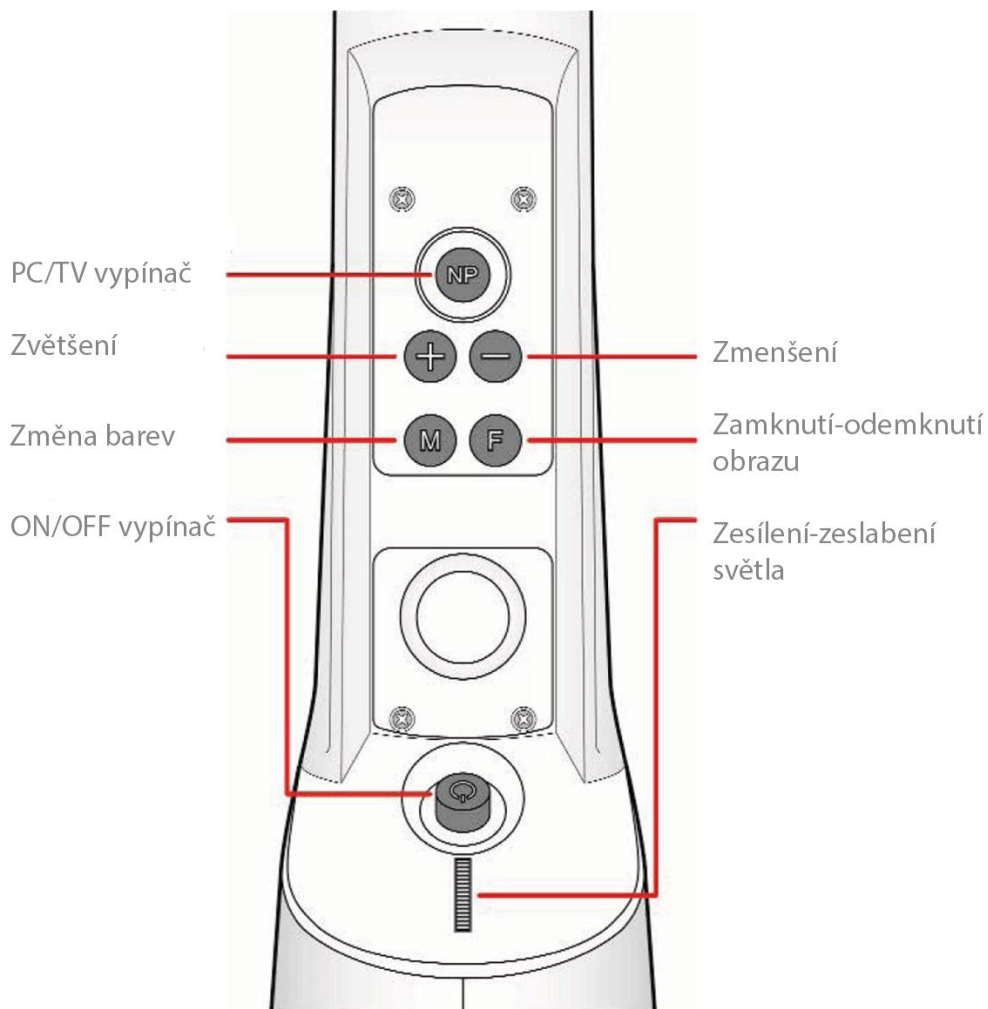

Instalace:

1. Výstupní AV kabel zapojte do televizního přijímače nebo LCD monitoru do vstupu AV(video) a televizor zapněte.
2. Připojte síťový adaptér do napájecího konektoru (jack) a následně zapojte do síťové zásuvky.
3. Zapněte na lupě ON/OFF vypínač.
4. Na televizoru vidíte obraz z TV lupy. Pokud ne, přepněte televizor dálkovým ovladačem nebo z ovládacího panelu do režimu **Video**.

Při čtení používejte nejmenší zvětšení, při němž ještě dokážete číst.

Při čtení totiž pak

- se na stránce snáze orientujete;
- nemusíte předlohu tolik posunovat po stolku;
- zaostření má větší hloubku ostrosti.

Práce s lupou

Čtení

Postavte lupu na vhodný stolec blízko televizoru a posaďte se před lupu. Obrazovka televizoru by měla být ve výšce očí nebo trochu níž, čtecí stolec lupy by měl být v úrovni loktů.

Předlohu, kterou chcete číst, si položte na čtecí stolec. Upravte si velikost zvětšení. Dbejte, aby kamera byla ve vodorovné poloze, jen tak vidíte obraz v optimální kvalitě.

Posuňte předlohu po stolku tak, až vidíte vršek stránky a najdete místo, odkud chcete číst. Při čtení pak jednoduše posouváte předlohu ze strany na stranu a čtete přitom z televizní obrazovky.

Psaní

Na čtecí stolec bez podložky položte papír a najděte místo, kam chcete psát. Papír pevně držte, zvedněte pero nad papír tak, abyste viděli jeho špičku na obrazovce proti místu, kam budete psát. Potom pero přiložte k papíru a pište. Při psaní se dívejte na obrazovku.

Rady a tipy

Při dobrém osvětlení předlohy máte lepší obraz. Je-li to možné, volte nepřímé osvětlení, v opačném případě mohou vrhané stíny zhoršovat čitelnost předlohy.

Jestliže osvětlení z okolí není dostatečné, zapněte vlastní osvětlení lupy. Při nedostatečném osvětlení je obraz zašuměný. V tom případě použijte kolečko na zesílení/zeslabení světla.

Údržba lupy

Nesahejte na objektiv, nečistoty na objektivu způsobují rozmazání nebo neostré skvrny v obrazu. Pokud je nutné objektiv očistit, otřete jej pouze měkkou a suchou utěrkou při minimálním tlaku na čočku. Povrch čočky je leštěný s naneseným povlakem, proto při čištění nikdy nepoužívejte vlhkou či hrubou utěrkou, ani saponáty, ředidla či jiná čisticí prostředky s brusnými účinky.

K napájení používejte pouze dodávaný síťový adaptér a kabeláž lupy občas prohlédněte, zda není povrchově poškozená. Chystáte-li se s lupou do zahraničí, informujte se nejprve o rozvodných a televizních normách platných v cílové zemi – lupa by nemusela fungovat.

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.